



# ARGOTIAB®

Z MIKROCZĄSTECZKAMI AKTYWNEGO SREBRA

Hexanova®

## ARGOTIAB® SPRAY 125 ml e

Wyrob medyczny wspomagający ochronę ran i otarć na skórze. Do użytku zewnętrznego.

**Wskazania do stosowania:** wyrób medyczny **ARGOTIAB®** SPRAY to proszek, który dzięki swoim właściwościom pełni funkcję bariery ochronnej, zapobiegając maceracji ran, w szczególności w przypadku ran sączących oraz pomagając w przywróceniu prawidłowych warunków fizjologicznych potrzebnych do spontanicznej regeneracji skóry. Dzięki składnikom produktu, na skórze nie powstają infekcje, które często pojawiają się w obecności ran z wysiękiem, w przebiegu stopy cukrzycowej, stopy atlety oraz w przypadku odleżyn i niewielkich ran ciętych. Działanie ochronne wynika z połączenia kaolinu z kwasem hialuronowym o właściwościach hydrofilowych. Każdy z tych składników ma określone działanie: kaolin, nazywany białą gliną, działa jak materiał wchłaniający w przypadku ran sączących, kwas hialuronowy działa nawilżająco. TIAB – kompleks dwutlenku tytanu połączonego kowalencyjnie z mikrocząsteczkami aktywnego srebra, wchodzi w skład bariery utworzonej przez kaolin i kwas hialuronowy, zapewnia odporność tej bariery na ataki ze strony drobnoustrojów, wspomaga w ten sposób ochronę rany. **ARGOTIAB®** SPRAY jest proszkiem do stosowania miejscowego tworzącym skuteczną barierę ochronną i wspomagającym naturalne procesy odnowy tkanki poprzez podwójne działanie:

- izoluje miejsce zastosowania proszku, tworzy mikrośrodowisko rany sprzyjające jej szybkiemu i spontanicznemu gojeniu;
- chroni przed infekcjami, zabezpiecza przed tworzeniem się flory bakteryjnej w miejscu zastosowania, tworząc w ten sposób lepsze warunki do regeneracji tkanek skóry.

**Sposób użycia:** 1) Przed nałożeniem umyć skórę i dokładnie ją osuszyć. 2) Zaaplikować cienką warstwę proszku na chore miejsce. 3) Nie masować. 4) Powtarzać czynność dwa razy dziennie. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na składniki wyrobu. Nie stwierdzono działań niepożądanych w przypadku przedawkowania. Nie są znane interakcje z lekami i substancjami medycznymi. **Skład:** TIAB (kompleks dwutlenku tytanu połączonego kowalencyjnie z mikrocząsteczkami aktywnego srebra), kaolin, hialuronian sodu, krzemionka, gaz: N-butan. **Termin ważności:** termin ważności odnosi się do wyrobu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu.

### Ostrzeżenia:

- Po nałożeniu produktu nie masować; proszek musi utworzyć warstwę ochronną.
- Zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu z oczami, w razie dostania się produktu do oczu natychmiast przemyć wodą.
- Unikać zbyt długiego stosowania produktu.
- Do użytku zewnętrznego, nie połykać.
- Nie stosować produktu, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Nie sterylizować.

- Po użyciu opakowanie dokładnie zamknąć.
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności.
- Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Przerwać stosowanie produktu w przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych na skórze.
- W przypadku długiego stosowania skonsultować się z lekarzem.
- Zastosowanie produktu nie wymaga pomocy innych osób.

### Wstrząsnąć bezpośrednio przed użyciem.



**ZAGROŻENIA:** Spray łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem: w czasie podgrzewania może grozić wybuchem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, wolnych płomieni lub innych źródeł zapłonu. Nie palić. **Nie rozpylać sprayu kierując go w stronę wolnego płomienia lub innych źródeł zapłonu.** Nie przebiegać ani nie palić opakowania nawet po zużyciu produktu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C/122°F.



**Wytwórca:** NTC S.r.l., Via Luigi Ranza, 3, 20124 Mediolan, Włochy  
**Dystrybutor:** HEXANOVA Sp. z o.o., ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki

e1753

SR1IA03501

Wyrób medyczny

C € 0477

Data ważności i numer serii na dnie opakowania

Data aktualizacji: 03.2021